

Ededay[®]

Solución oftálmica estéril hipertónica
Sin conservantes
Frasco de 10ml



Ededay es un producto sanitario que ayuda a proporcionar un alivio temporal de los síntomas del edema corneal.

Composición

Hialuronato de sodio, ácido bórico, Kolliphor P407, trometamol, sorbitol, agua.

¿Qué es Ededay?

El frasco de Ededay contiene 10 ml de solución oftálmica estéril hipertónica, sin conservantes.

Gracias a su innovadora formulación, Ededay posee propiedades mucoadhesivas que permiten una mejor adherencia a la superficie ocular para asegurar la hidratación y protección del ojo.

¿Cuándo debe usarse Ededay?

Ededay es una solución oftálmica estéril hipertónica, sin conservantes, indicada para el alivio temporal de los síntomas del edema corneal, como la alteración de la visión y del dolor.

Ededay se caracteriza por poseer una osmolaridad mayor que el líquido lagrimal: la diferencia en la osmolaridad es necesaria para la reabsorción del líquido edematoso. La aplicación de Ededay proporciona a la superficie de la córnea un aumento de la osmolaridad al retirar el agua desde las capas corneales. El hialuronato de sodio contenido en Ededay forma un escudo protector en el ojo que proporciona protección e hidratación. El hialuronato de sodio hace que la aplicación de Ededay sea más cómoda gracias a sus propiedades lubricantes y protectoras mecánicas reduciendo la típica sensación de ardor e irritación de las soluciones hipertónicas.

¿Cómo debe usarse Ededay?

- Lávese bien las manos antes de usar Ededay.
- Incline un poco la cabeza hacia atrás y tire del párpado inferior del ojo hacia abajo para formar un saco.
- Sostenga el frasco verticalmente sobre su ojo y mire hacia la punta azul del frasco.
- Presione suavemente el frasco para aplicar una gota en su ojo. Repita el proceso en su otro ojo.
- Tenga cuidado de que la punta del frasco no toque su ojo ni sus dedos.
- Cierre correctamente la tapa después de usarlo.
- Aplicar una o dos gotas en cada ojo, cada tres o cuatro horas de acuerdo a la prescripción médica.

Advertencias:

- No utilice Ededay en caso de hipersensibilidad conocida o alergia a alguno de sus componentes.
- En caso de irritación ocular, deje de usar Ededay y consulte a su médico.
- No utilice el producto si el envase está dañado.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad.
- Utilícelo dentro de las 8 semanas posteriores a la primera apertura.
- No ingiera el producto.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Tenga cuidado de que la punta del frasco no toque su ojo ni sus dedos.
- No comparta Ededay con nadie más.
- En casos raros, después de la administración de Ededay, puede experimentar visión borrosa temporal debido a la viscosidad de la solución. Espere unos minutos antes de realizar cualquier actividad que requiera una visión clara.
- Quítese las lentes de contacto antes de usar Ededay, de lo contrario, la superficie de las lentes de contacto puede verse afectada. Espere al menos 30 minutos antes de volver a ponérselas.
- Si está usando cualquier otro colirio o ungüento, deje al menos treinta minutos entre cada aplicación.
- Consulte a su médico antes de usar Ededay durante el embarazo y la lactancia.
- El producto normalmente está destinado a un uso continuo durante no más de siete días consecutivos; si sus síntomas no mejoran, consulte con su médico.

Fecha de revisión: 06/2019

Distribuido en España por
NTC OPHTHALMICS IBERICA, S.L., Calle Pinar, 5 - 28006 Madrid, España

NTC S.r.l.
Via Luigi Razza, 3, 20124, Milano, Italia

 **ntcophthalmics**
Novelty. Technology. Care.

 0426

 25°C
9°C

STERILE A



LFHAG01100