


Edenight

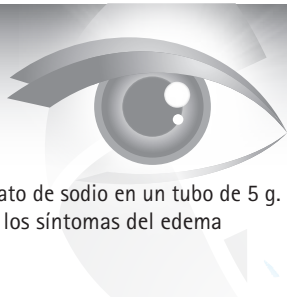

Edenight es una pomada oftálmica hipertónica que contiene 4,5 % de cloruro de sodio y 0,4% de hialuronato de sodio en un tubo de 5 g. Este producto sanitario proporciona un alivio temporal de los síntomas del edema corneal.

¿Qué es Edenight?

El tubo de Edenight contiene 5 g de pomada oftálmica estéril e hipertónica cuya formulación consiste en cloruro de sodio como agente hipertónico, hialuronato de sodio, aceite de vaselina, vaselina, fosfato de potasio monobásico, fosfato disódico, alcohol de lanolina, agua e hidroximetilglicinato (μ water™).

La naturaleza viscosa de Edenight permite una adhesión prolongada a la superficie ocular realizando su acción hidratante y protectora incluso en horas nocturnas.

¿Cuándo se debe utilizar Edenight?

Edenight es una pomada oftálmica hipertónica estéril indicada para el alivio temporal de los síntomas del edema corneal, como la alteración de la visión y del dolor, incluso en horas nocturnas. Gracias a su alto contenido de cloruro de sodio, Edenight se caracteriza por presentar una osmolaridad más alta que el líquido lagrimal: esta diferencia es necesaria para la reabsorción de líquido edematoso. La aplicación de Edenight da como resultado una mayor concentración salina en la película lagrimal y, en consecuencia, un movimiento del agua de las capas corneales hacia la superficie. El hialuronato de sodio que contiene Edenight forma un escudo protector en la superficie corneal, proporcionando protección e hidratación. El hialuronato de sodio también hace que la aplicación de la pomada hipertónica sea más cómoda gracias a sus propiedades de lubricación y protección mecánica.

¿Cómo usar Edenight?

- Lávese bien las manos antes de usar Edenight.
- Al abrir Edenight, no utilice la primera parte de la pomada hasta que salga pomada del tubo, ya que podría ser acuosa.
- Incline la cabeza ligeramente hacia atrás y tire del párpado inferior del ojo hacia abajo para formar una bolsa.
- Sostenga el tubo verticalmente sobre el ojo.
- Presione suavemente el tubo para liberar una pequeña parte de Edenight en el ojo a tratar.
- Aplique una pequeña cantidad de pomada preferiblemente antes de acostarse.
- Si se requiere una dosis diaria adicional, aplicar una pequeña cantidad de pomada cada tres o cuatro horas, o de acuerdo con la prescripción médica.
- Tenga cuidado de que la punta del tubo no toque ni el ojo ni los dedos.
- Cierre correctamente el tapón después de su uso.

Advertencias:

- No utilice Edenight en caso de hipersensibilidad conocida o alergia a cualquiera de los componentes.
- En caso de irritación ocular, deje de utilizar Edenight y consulte a su médico.
- Después de la aplicación, puede experimentar una sensación de cuerpo extraño que desaparece al parpadear.
- No utilice el producto si el envase está dañado.
- No utilice el producto después de su fecha de caducidad.
- Utilice el producto dentro de las 8 semanas desde la primera apertura.
- Almacene y mantenga lejos de las fuentes de calor directo, en un lugar fresco y seco a una temperatura que oscile entre los 9 y los 25°C.
- No ingiera el producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No comparta Edenight con nadie más.
- La naturaleza viscosa y la presencia prolongada en el ojo de Edenight pueden causar visión borrosa temporal. Asegúrese de que puede volver a ver claramente antes de conducir o de utilizar herramientas o máquinas.
- Qúitese las lentes de contacto antes de usar la pomada; de lo contrario la superficie de las lentes de contacto puede verse afectada.
- Si está utilizando otras gotas o pomadas para los ojos, deje unos quince minutos entre la aplicación de cada una. Se recomienda utilizar Edenight en último lugar.
- Durante el embarazo y la lactancia, consulte a su médico antes de usar Edenight.
- El producto ha sido previsto para un uso continuo no superior a siete días consecutivos; si los síntomas no mejoran, consulte a su médico.
- No utilice Edenight en caso de lesiones oculares.

Tubo de 5 g

Rev: 2/2019

Distribuido en España por:

NTC OPHTHALMICS IBERICA, S.L.

Calle Pinar, 5 - 28006 - Madrid , España

 **NTC S.r.l.**
Via Luigi Razza, 3
20124 Milano, Italia

 **ntc**ophthalmics
Novelty. Technology. Care.

